



Istruzioni per la raccolta delle feci

Per raccogliere il campione di feci si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:

1. Disporre più strati di carta igienica nel WC/bidet in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo.
2. Svitare ed estrarre dal contenitore il tappo con il cucchiaino, facendo attenzione a non versare il liquido contenuto. Non aggiungere nessun altro tipo di liquido nel contenitore.
3. Raccogliere qualche grammo di campione fecale utilizzando il cucchiaino del tappo (circa un cucchiaino).
4. Chiudere il contenitore riavvitando il tappo e agitarlo delicatamente in modo da miscelare uniformemente il campione con il liquido.
5. Controllare che sul contenitore sia riportato il Suo codice identificativo abbinato al questionario.
6. Annotarsi il tipo di score fecale eseguito riferendosi alla scala di Bristol.
7. Mettere il contenitore nell'apposita busta di plastica.

Effettuare la spedizione del prelievo il più rapidamente possibile tramite raccomandata. Il campione è stabile a temperatura ambiente per diverse settimane.

Le ricordiamo che:

- Non è necessario praticare alcuna particolare dieta prima del test.
- Evitare di contaminare le feci con le urine.
- Non prelevare in caso di feci estremamente diverse da quelle solite
- Non ingerire. Qualora il liquido entri in contatto con occhi, bocca, e pelle sciacquare accuratamente con acqua e, se necessario, contattare un medico.
- Non utilizzare il contenitore in caso di rottura del cucchiaino o di perdita del liquido in esso contenuto.

Scala di Bristol

	1 Feci caprine (stipsi severa)
	2 Feci grumose (stipsi moderata)
	3 Feci normali (con crepe in superficie)
	4 Feci normali (morbide)
	5 Feci poltacee (non conformate)
	6 Diarrea
	7 Diarrea acquosa